



DENTAROW 각부의 명칭 설명

1. **TIME**: 단위는 초이며, 약품투입 양을 결정합니다. 대단히 중요한 것으로 연구에 의해 결정되어야 합니다. 조작은 상(▲), 하(▼) 버튼에 의해서 변경할 수 있습니다.
2. **TDS(조작부)**: Total Dissolved Solids의 약자이며, 물의 온갖 성분(부유물)의 총체를 의미합니다. 정수기의 Filter 교체 시기를 알려주며, Setting 수치 이상이 되면 1초 간격으로 경보음과 동시에 TDS Lamp가 깜빡입니다.
Alarm은 Button으로 멈출 수 있지만 TDS Lamp는 Filter를 교체하여 TDS수치가 저하 될 때까지 계속 깜빡이게 됩니다. 조작은 상(▲), 하(▼) 버튼에 의해서 변경할 수 있습니다.
3. **PO**: Electric Power이며 (PO) Lamp가 켜(ON상태)있으면 AC 220V 전원이 공급되고 있음을 의미합니다.
4. **MT**: 급수 Motor이며 (MT) Lamp가 켜(ON상태)있으면 Motor가 가동되고 있음을 의미합니다. 원수 수압이 낮은 지역에서 사용합니다.
5. **PW**: Pure Water의 약자이며, Button을 누르면 정해진 시간만큼 (PW) Lamp가 켜(ON상태)

지고 상단부 수도꼭지로 정해진 만큼 물이 나옵니다.

6. **DR**: DENTAROW의 약자이며, 약품 원액을 의미합니다. (DR) Lamp가 켜(ON상태)있으면 약품이 Mixer Tank로 들어가고 있는 것이며, 정해진 양의 약품이 공급된 후에 자동으로 (DR) Lamp가 꺼(OFF상태)집니다.
7. **MX**: Mixer이며 (MX) Lamp가 켜(ON상태)지면 약품과 신선한 물이 배합되고 있는 중임을 의미합니다.
8. **SP**: Supply이며 (SP) Lamp가 켜(ON상태)있으면 배합된 위생수가 Stand-by Tank로 흘러 들어 가고 있음을 의미합니다.
9. **DS**: DENTAROW Sensor로 Alarm과 함께 (DS) Lamp가 0.5초 간격으로 깜빡이면 약품이 없다는 것을 의미하므로 즉시 약품 원액을 보충해야 합니다. 경보음은 AL-Stop Button으로 멈출 수 있지만 (DS) Lamp는 약품이 공급될 때까지 계속 깜빡입니다.
10. **TDS(램프)**: Total Dissolved Solids의 약자이며, Alarm과 함께 (TDS) Lamp가 1초 간격으로 깜빡이면 TDS 수치가 높은 것으로 정수기 Filter를 조속히 갈아 주어야 합니다. 경보음은 AL-Stop Button으로 멈출 수 있지만 (TDS) Lamp는 Filter를 교환할 때까지 계속 깜빡입니다.
11. **SW**: Key-SW이며 AC 220V 전원을 켜고 끌 수 있습니다.